

マキテック


ステッキの選び方について

最適な長さの選び方・身長と杖の長さの目安

杖の先を前外方向20cmに置いたときひじの角度が30～40度になる長さが最適な長さの目安です。

杖の長さは短すぎると姿勢が悪くなります。また長すぎると杖に体重をかけることが出来なくなるので、最適な長さにする必要があります。

$$\text{杖の長さの目安} = \text{身長} \div 2 + 3 (\text{cm})$$

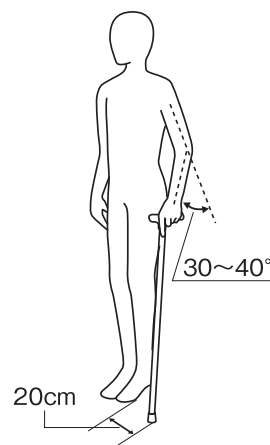

身長と杖の早見表


単位:cm

身長	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178
杖の長さ	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

※ 体型により適切な長さは変わってきます。標準の寸法を参考にして、よい姿勢で使ってみて疲れない長さを選んでください。

グリップのにぎり方

T字のつけ根部分をにぎってください。

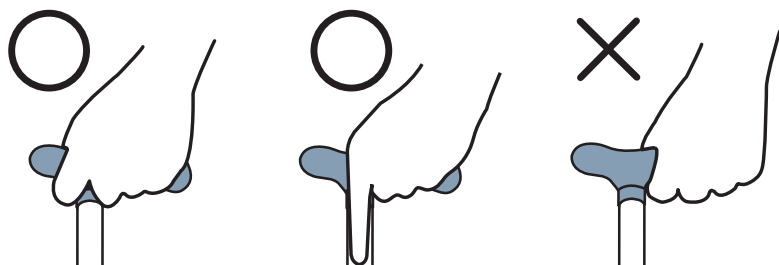

警告

正しい持ち方でご使用ください。
※ 誤った持ち方で使用すると、破損やケガの原因になり危険です。

ステッキアイコン説明



スリムネック

支柱上部の形状が細くなっている
ので指への負担が小さいです。



着脱式ストラップ

杖が扉などに挟まった等トラブル
時にストラップを杖からすぐに
外せて安心です。



杖先ゴムサイズ

4点支柱杖や棒状杖など先ゴムの
形状やサイズは製品により様々
です。



抗菌グリップ

抗菌仕様で安心して握れるグリップ
です。