

歩行器

Walker ~ウォーカー~

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器

本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのに便利な折りたたみ式です。



折りたたみ時

HK-100



折りたたみ時

HK-200

HK-100 (固定型)

HK-200 (交互型)

¥15,000 (非課税)

¥15,000 (非課税)

品番 HK-100 JANコード 4968501-886904 TAISコード 00690-000032

品番 HK-200 JANコード 4968501-887000 TAISコード 00690-000033

■仕様

サイズ	W58(59)×D44(11)×H70~80(71)cm 後方60 ()折りたたみ時 高さは5段階調節(2.5cm間隔)
先ゴムサイズ	22φ
重量	2.2kg
主材質	本体(アルミ)、グリップ(PVC)、先ゴム(合成ゴム)、その他樹脂部(PE)

■仕様


サイズ	W56(56.5)×D44(12)×H70~80(72)cm 後方56 ()折りたたみ時 高さは5段階調節(2.5cm間隔)
先ゴムサイズ	22φ
重量	2.6kg
主材質	本体(アルミ)、グリップ(PVC)、先ゴム(合成ゴム)、その他樹脂部(PE)



HK-110

(固定型・前輪固定キャスター付)

HK-110

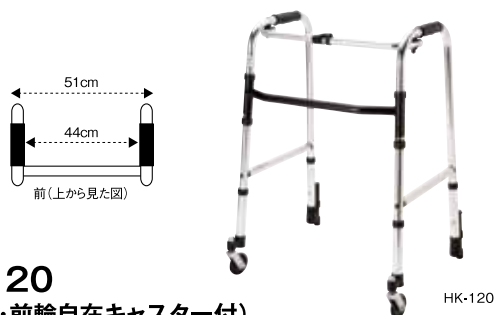

HK-120

(固定型・前輪自在キャスター付)

HK-120

¥20,000 (非課税)

¥21,000 (非課税)

品番 HK-110 JANコード 4968501-887208 TAISコード 00690-000034

品番 HK-120 JANコード 4968501-887307 TAISコード 00690-000035


■仕様

サイズ	W58(63)×D49(10.5)×H78~88(80)cm 後方60.5 ()折りたたみ時 高さは5段階調節(2.5cm間隔)
先ゴムサイズ	22φ
重量	2.5kg
主材質	本体(アルミ)、グリップ(PVC)、先ゴム(合成ゴム)、キャスター・後脚ストッパー部(ナイロン)、その他樹脂部(PE)

■仕様

サイズ	W60(65)×D49.5(10.5)×H77.5~87.5(79)cm 後方60.5 ()折りたたみ時 高さは5段階調節(2.5cm間隔)
先ゴムサイズ	22φ
重量	2.8kg
主材質	本体(アルミ)、グリップ(PVC)、先ゴム・キャスター(合成ゴム)、後脚ストッパー部(ナイロン)、その他樹脂部(PE)

歩行器の使用方法

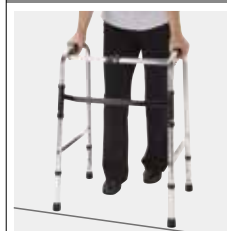


歩行イメージ(固定型)
同時に前に出して(進んで)使用します。



歩行イメージ(交互型)
交互に前に出して(進んで)使用します。

調節・使用方法

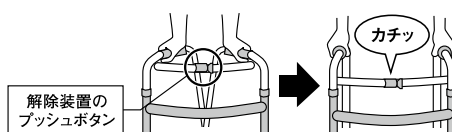

開き方

左右のグリップを解除装置のプッシュボタンがカチッというところまで開いてください。

閉じ方

解除装置のプッシュボタンを押しながら閉じてください。

オプション部品取付け方法

オプション取付時は、プッシュボタンがカチッというところまで入れ、4脚全てが同じ高さになるように調節してください。プッシュボタン式ですので取付が簡単です。

